


G10-600

CE 0197

innoG10

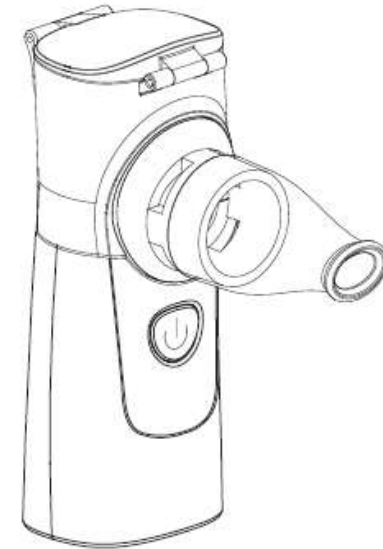

G10vital *mini mesh*

INHALÁTOR

Návod k použití

Verze: V1.1

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto přístroje.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití. Zjistíte si tak správné a bezpečné používání výrobku a předejdete riziku případného poškození výrobku nebo Vašeho zdraví.

Výstražné ikony uvedené v tomto návodu upozorňují na bezpečné a správné používání tohoto produktu. Jsou zde uvedeny pro prevenci rizika a poškození vás i ostatních.

- Tento přístroj je zdravotnický prostředek. Dodržujte pokyny lékaře a jednotku používejte správně.
- Pokud jde o typ, dávku a režim léčby, postupujte podle pokynů lékaře.
- Nebulizační/rozprašovací charakteristiky tohoto přístroje se mohou lišit různými vlastnostmi léku.
- Zejména při použití léčiva s vysokou povrchovou aktivitou nebo viskozitou může být rychlost nebulizace snížena.
- Míra nebulizace může být také snížena, je-li nízká teplota léků.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně

- Pokud jde o typ, dávku a režim léčby, postupujte podle pokynů lékaře.
- Vaše příznaky se mohou zhoršit. Pokud používáte jednotku poprvé po zakoupení nebo po delší době nepoužívání, nezapomeňte vyčistit a vydezinfikovat kalíšek na léky, inhalační masku a náustek.
- Na nevyčištěných či nepoužívaných částech se mohou množit různé bakterie a můžete se nakazit. Po každém použití očistěte a vydezinfikujte kalíšek na léky, inhalační masku a náustek. Vyčištěné a dezinfikované části řádně vysušte a uložte je na čistém místě.
- Tato jednotka je určena pro osobní použití. Není vhodná pro více než jednoho uživatele.
- Uchovávejte tento přístroj mimo dosahu dětí. Hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí. Hlavní jednotka může být zničena nebo může způsobit poranění dětem i dospělým. V případě vdechnutí malé části, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Základnu ani USB kabel nevkládejte do vody. Mohlo by dojít k úniku elektřiny nebo k úrazu elektrickým proudem.


⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - čtěte pozorně

- Neinhalujte samotnou vodu.
- Nedávejte léky na hlavní jednotku. Pokud se tak stane, ihned jednotku otřete jemným hadříkem.
- Používáte-li jednotku ve vlhkém stavu, může to způsobit potíže nebo úraz elektrickým proudem.
- Je-li jednotka poškozená, nadále ji v žádném případě nepoužívejte, hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem.
- Chraňte základní jednotku a kalíšek na léky před pádem či silným nárazem.
- Používejte pouze dodaný innoGIO USB kabel. Je-li USB kabel poškozený či zlomený, nadále jej nepoužívejte.
- Jednotku v žádném případě sami neopravujte ani nerozebírejte.


VLASTNOSTI VÝROBKU

- Tento výrobek je určen k léčbě respiračních onemocnění, jako je astma, alergie aj.
- Princip: díky oscilačnímu obvodu jsou keramické desky obsažené v nebulizační základně společně s kovovou sítkou poháněny postupně oscilovat vysokou frekvencí, což způsobuje, že kapalina protéká mikrosítem a následně je vymrštěna a nebulizována za vzniku inhalačního aerosolu.

POUŽITÉ SYMBOLY

 Bezpečnostní symbol, který se používá k varování nebo bezpečnostním opatřením. Důležité, prosíme, čtěte.


 Výrobce.

 Elektrické zařízení vyhodte do tříděného odpadu.

POPIS VÝROBKU

Balení obsahuje následující části. Pokud některá z nich v balení chybí, prosíme, kontaktujte prodejce, u něž jste výrobek zakoupili.


1. základna
2. kelímeček na léky
3. 2x baterie AA 1,5V
4. náustek
5. úložný vak
6. USB kabel
7. dětská inhalační maska
8. inhalační maska pro dospělé

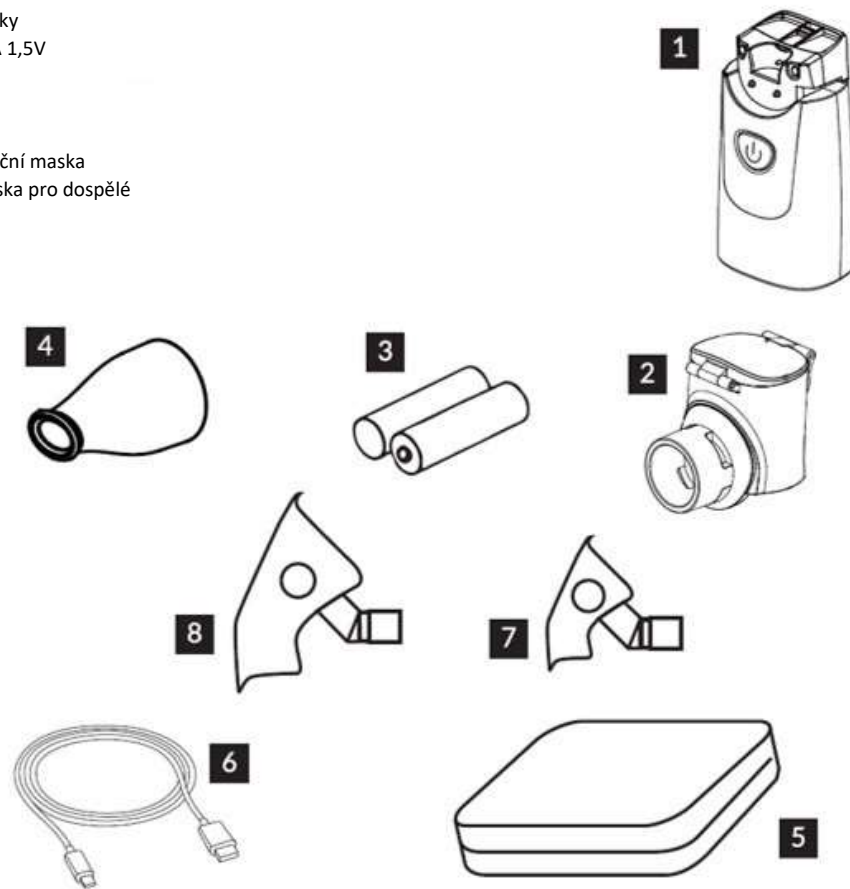

Před zahájením inhalace musí dojít k sestavení přístroje – viz. dále.

ČÁSTI VÝROBKU

1. kryt kelímku na léky
2. kovová síťka
3. elektroda
4. hlavní část
5. tlačítko ON/OFF
6. tlačítko kelímku na léky
7. USB vstup
8. kryt baterií

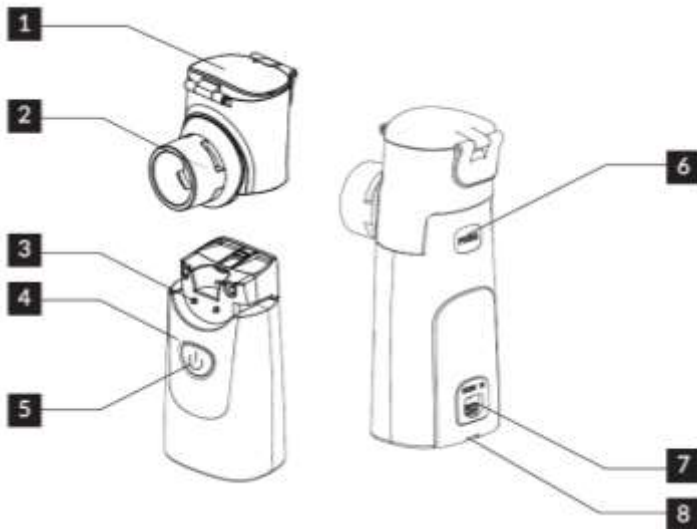


NAPÁJENÍ

Přístroj funguje za pomoci baterií nebo USB kabelu.

- Použití USB kabelu.

- ⚠ - dodaný kabel je micro USB
- napětí 5V

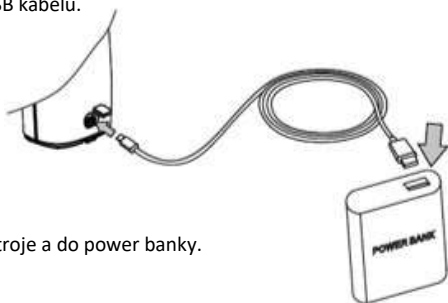


Zapojte USB kabel do hlavní jednotky přístroje a do power banky.
Pozn: Power banka není součástí balení.

- Vložení baterií.

- ⚠ - Do přístroje nevkládějte dobíjecí baterie!

1. Otevřete kryt na baterie.

2. Vložte baterie dle správné polaritě +/-.

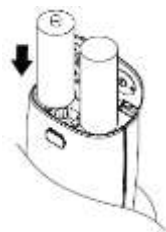

3. Zavřete kryt na baterie.

Životnost baterií a jejich výměna

- alkalické baterie – výdrž cca 3 dny (při používání cca 30 minut denně)
- bliká-li rychle podsvícení tlačítka napájení (interval menší než 0,3 sek), je zapotřebí baterie co nejdříve vyměnit za nové

Doporučení

- Vybité baterie vyměňte co nejdříve za nové.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (3 a více měsíců), baterie z přístroje vyjměte.
- Pokud jednotku nebudete používat a ponecháte v ní baterie, může dojít k vytečení baterií a k poškození jednotky.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu +/-.
- Do přístroje vkládejte pouze baterie typu AA 1,5V.
- Do přístroje spolu nikdy nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různého typu.

VLOŽENÍ LÉKŮ

Otevřete kryt kelímku na léky a vložte předepsané léky.

1. Otevření krytu



2. Vložení léků

Vlijte léky dle obrázku.
Max. kapacita je 8ml.



3. Zavření a zajištění krytu

Mohlo by dojít k úniku léků.




Lék můžete plnit přímo do smontované jednotky nebo kelímek na léky ze základny sejmout a naplnit jej samostatně. Pokud plníte lék do kelímku samostatně, vyjměte kelímek z hlavní jednotky a naplňte jej lékem. Poté těsně uzavřete kryt kelímku a nasadte jej zpět k hlavní jednotce.


Pro vyjmutí kelímku na léky stiskněte tlačítko PUSH a držte jej stisknuté. Kelímek ze základny vyjměte.



Nasadte zpět naplněný kelímek na léky dokud neuslyšíte zacvaknutí.

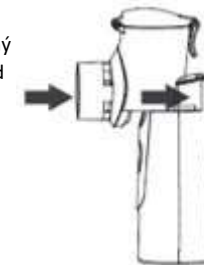

4. Nasazení inhalační masky / náustku

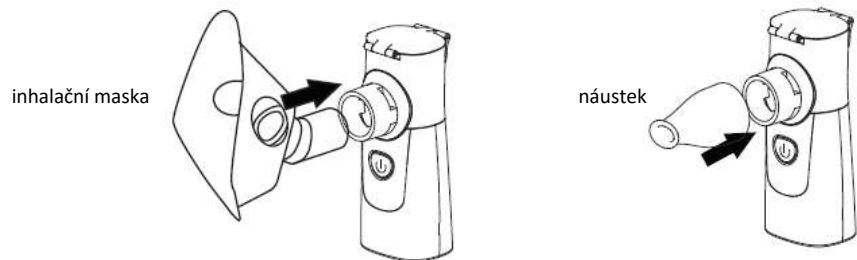


- ⚠** Pro děti mladší 5let doporučujeme použít raději inhalační masku.
- malé dítě neumí používat náustek správným způsobem
 - náustek či jiné malé části by mohly být malým dítětem spolknuty

JAK INHALOVAT

A. Uchopte přístroj do ruky a stiskněte tlačítko ON/OFF.

Během nebulizace bude podsvícení tlačítka pomalu blikat (cca v intervalu 4 sekund).

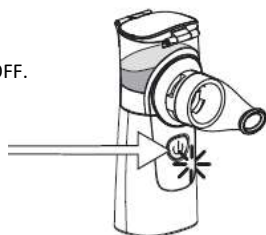

- Pokud se na vnitřním povrchu kalíšku nashromáždí příliš mnoho léků nebo se tam usadí sliny, vypněte napájení a jemnou gázou kalíšek vyčistěte.
- Má-li lék vysokou povrchovou aktivitu, může vystříkavat z kovové sítky.



Upozornění: Kovovou sítku v žádném případě nečistěte vatovým tamponem nebo ostrým předmětem, např. špendlíkem. Mohlo by dojít k poškození kovové mřížky, přístroj by byl nefunkční.

- Má-li lék vysokou povrchovou aktivitu, může být snížena rychlost nebulizace.
- Během provozu může přístroj vydávat neobvyklý zvuk, což ale není považováno za závadu.

B. Po ukončení inhalace stiskněte tlačítko ON/OFF.

- Používáte-li napájení přes USB kabel, odpojte jej od power banky.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PO INHALACI

- ⚠** Po každém použití přístroj řádně vyčistěte, vysušte a uschovejte jej.


A. Ze základny odstraňte části - inhalační masku/náustek, kalíšek na léky



B. Vylijte zbývající léky – otevřete kalíšek na léky a vylijte jej.




C. Důkladně umyjte části ve vodě – inhalační masku / náustek, kalíšek na vodu

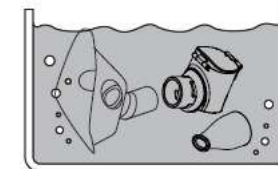

- Je-li potřeba, opatrně očistěte kovovou sítku od léků a slin. V žádném případě se kovové mřížky nedotýkejte přímo, mohlo by dojít k jejímu poškození a tím i ke zničení přístroje.


D. Všechny části osušte – ihned po umytí všechny části vysušte jemnou gázou.

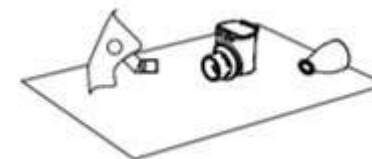

- ⚠** Nikdy se nepokoušejte otřít vodu hadříkem. Na kovové sítky by z něj mohly zůstat vlákna, která by mohla negativně ovlivnit další nebulizaci.

E. Jemně otřete hlavní jednotku.

Otřete a vysušte také místa znázorněná na obrázku.

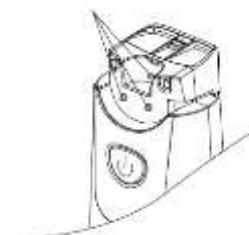

F. Přístroj včetně příslušenství uchovávejte na suchém a čistém místě.

DESINFEKCE

Kalíšek na léky, náustek a inhalační masky přicházejí do přímého kontaktu s uživatelem, proto je nezbytné udržovat je čisté!

1. Dezinfekce kalíšku na léky: Ponořte kalíšek na 3 minuty do 75% lékářského alkoholu a vysušte jej v čistém prostředí. Poté jej skladujte na čistém místě.
2. Dezinfekce náustku a inhalační masky: Vytřete části 75% lékářským alkoholem a vysušte je v čistém prostředí. Poté je skladujte na čistém místě.

KALÍŠEK NA LÉKY

- Doporučujeme používat kalíšek na léky max. po dobu cca 1 roku (při běžném používání cca 30 minut denně).

- Přístroj může přestat nebulizovat i dříve než za 1 rok, v závislosti na tom, jak jej používáte.

V takových případech vyměňte kalíšek na léky za nový. Kalíšek na léky je spotřební zboží (v případě opotřebení jej lze samostatně dokoupit, nepodléhá reklamaci).




UPOZORNĚNÍ

Nikdy neotírejte vodu z přístroje hadříkem – na kovové sítky by mohly zůstat vlákna, která by negativně ovlivnila proces nebulizace.

Kovovou sítku nečistěte žádným vatovým tamponem, ani se jí nedotýkejte žádnými kovovými předměty (špendlíkem, pinzetou apod.), mohlo by dojít k jejímu poškození.

Kovovou sítku nechte přirozeně oschnout na vzduchu.

Při používání výrobku se držte pokynů uvedených v tomto návodu, v opačném případě může uživatel ztratit záruku na výrobek.

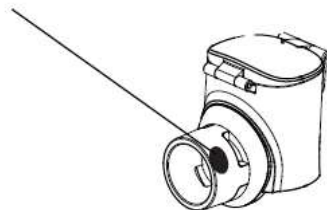

SPECIFIKACE

Model	GIO-600
Napětí	2 AA alkalické baterie (3V) / micro US kabel (5V)
Spotřeba energie	cca 2 W
Ultrasvuková frekvence	cca 145kHz
Rychlost rozprašování	> 0,20 ml / min
Velikost částic	cca 5 µm
Kapacita kalíšku na léky	< 8 ml
Rozměr	48mm x 114mm x 58mm
Váha	cca 91 g (bez baterií)
Životnost baterií	cca 90 minut za použití 2 AA alkalických baterií
Životnost kalíšku na léky	cca 180 hodin
Vhodné okolní prostředí	teplota 10°C – 40°C / vlhkost 30% - 85% RH
Stupeň znečištění	2
Kategorie napětí	II

Pozn.

Rychlost rozprašování se snižuje při nízké teplotě.

Specifikace a vzhled přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení.

PROBLÉMY A JEJICH MOŽNĚ ŘEŠENÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Míra nebulizace je extrémně nízká	Baterie jsou slabé nebo vybité.	Vyměňte baterie za nové.
	Kovová síťka je zanesená.	Vyčistěte kalíšek na léky. Pokud problém i nadále přetrvává, zakupte nový kalíšek na léky.
Přístroj nerozprašuje (proces nebulizace nefunguje)	Baterie nejsou vloženy ve správné polaritě +/-.	Vložte baterie dle správné polaritě +/-.
	Baterie jsou slabé.	Vyměňte baterie za nové.
	USB kabel není správně zapojen.	Správně zapojte USB kabel.
	Kalíšek na léky není správně nasazen.	Správně nasadte kalíšek na léky.
Tlačítko ON/OFF svítí, ale přístroj nerozprašuje	Kovová síťka je extrémně zanesená.	Zakupte nový kalíšek na léky a vyměňte jej.
	Kovová síťka je zlomená.	Zakupte nový kalíšek na léky a vyměňte jej.
	Na elektrodách jsou usazené léky nebo voda.	Léky nebo vodu opatrně odstraňte.
	Elektrody jsou zanesené.	Opatrně elektrody otřete.

Nedaří-li se Vám uvedené problémy odstranit, obraťte se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.