

geemarc™ CL7350
Hear the Difference

**BEZDRÁTOVÁ POSLECHOVÁ
SOUPRAVA CL7350**



www.geemarc.com

Návod k obsluze

Obsah

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití. Návod uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

ÚVOD	2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
OBSAH BALENÍ	3
• Sluchátka-přijímač	4
• Základna-vysílač, nabíjecí jednotka	5
INSTALACE	6
• Základna-vysílač nabíjecí jednotka	6
• Sluchátka-přijímač	7
PROVOZ	8
• Uvedení do provozu	8
• Běžný provoz	9
• Přepínání kanálů	10
• Ovládání tónu (basy a výšky)	11
• Nastavení vyvážení zvuku (vlevo-vpravo)	12
• Přepnutí na mikrofon.....	12
• Nabíjení baterie	13
TECHNICKÉ ÚDAJE	14
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
• Bez zvuku	15
• Zkreslení	15
Čištění a údržba	16
Náhradní díly	16
ZÁRUKA	17
CE PROHLÁŠENÍ	17
ZÁRUČNÍ LIST	18

ÚVOD

Bezdrátová souprava Geemarc CL7350 je zesilovací zařízení speciálně navržené pro nedoslýchavé. Umožňuje zesílený poslech televizního/rozhlasového přijímače nebo zesílení řeči přes vestavěný mikrofon.

Zvuk z televizoru nebo rádia je přenášen bezdrátově ze základny do sluchátek. Poslech je možný až do vzdálenosti 25 metrů od základny.

Možnost **nastavení intenzity hlasitosti do levého a pravého ucha a oboustranné nastavení výšek a basů** dle potřeby uživatele.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití.

Varování: Zvuk vycházející ze sluchátek může být velmi hlasitý. Pokud takto nastavená sluchátka použije osoba bez sluchového postižení může dojít k poškození sluchu.

Pozor: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení může být připojeno do sítě pouze přes síťový adaptér dodávaný s přístrojem.

Specifikace elektrického připojení: Přístroj je určen pro elektrický rozvod 100-240VAC-50/60Hz. Klasifikace „nebezpečného napětí“ dle normy EN60950.

Přístroj také lze vypnout odpojením od sítě. Při instalaci se ujistěte, že síťová zásuvka je snadno přístupná.

Důležité upozornění: Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterií. Baterie by měla být vyměněna autorizovaným prodejcem.

Nevystavujte přístroj vysokým teplotám a slunečnímu záření.

Chraňte před deštěm nebo vlhkostí.

Přístroj nikdy sami neotvírejte.

Pravidelně přístroj čistěte.

Přístroj může být rušen zařízeními, které generují silné elektrické nebo magnetické pole. Může se jednat o mikrovlnné trouby, mobilní telefony, transformátory osvětlení apod.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!