


# beurer

## BF 700

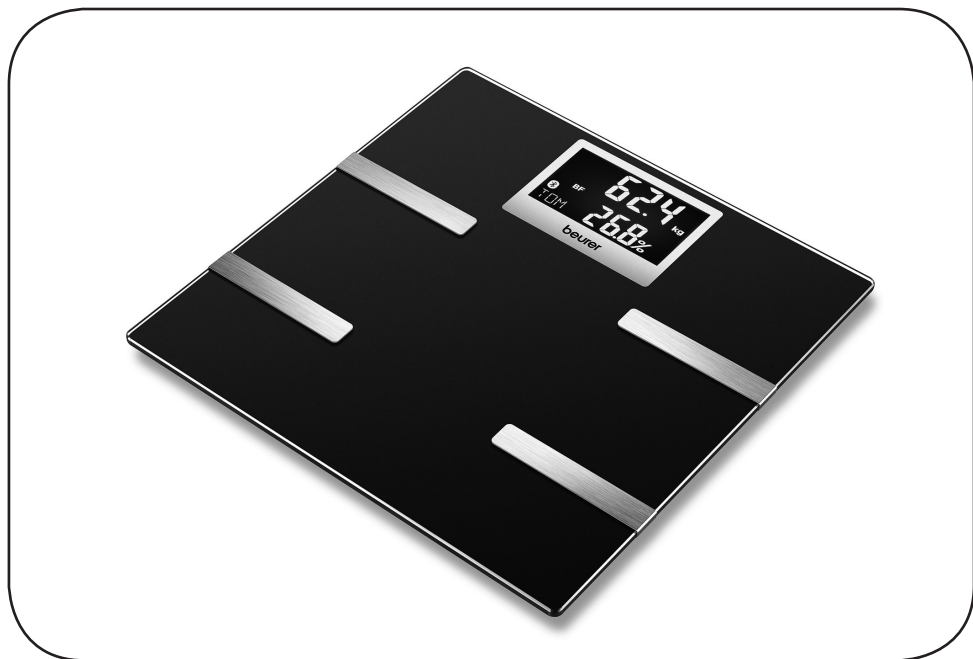

**CZ** **Diagnostická váha**  
Návod k použití

## Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotností, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem  
Váš tým Beurer

## Obsah

1. K seznámení .....	2	8. Vyhodnocení výsledků .....	6
2. Vysvětlení symbolů .....	3	9. Hodnocení výsledků .....	7
3. Bezpečnostní pokyny .....	3	10. Další funkce .....	9
4. Informace .....	4	11. Čištění a údržba zařízení .....	9
5. Popis zařízení .....	5	12. Likvidace .....	10
6. Uvedení váhy do provozu .....	5	13. Co dělat v případě problémů? .....	10
7. Uvedení do provozu s aplikací .....	5		

## Obsah dodávky

- Zkrácený návod
- Diagnostická váha BF 700
- 3x baterie 1,5 V, typu AAA
- Tento návod k použití

## 1. K seznámení

### Funkce zařízení

Digitální diagnostická váha slouží k vážení a diagnostice osobních tréninkových údajů. Je určena pro vlastní použití v soukromí.

Váha je vybavená následujícími diagnostickými funkcemi, které může využívat až 8 osob:

- měření tělesné hmotnosti,
- zjišťování podílu tělesného tuku,
- podílu vody v těle,
- podílu svalové hmoty,
- kostní hmoty a dále,
- hodnoty bazálního a aktivního metabolismu.

Kromě toho je váha vybavená následujícími dalšími funkcemi:

- přepínání mezi kilogramy „kg“, librami „lb“ a kameny „st“,
- funkce automatického vypnutí,
- ukazatel nutnosti výměny slabé baterie,
- automatické rozpoznání uživatele,
- LCD displej pro 3 iniciály uživatele,
- uložení posledních 30 měření pro 8 osob, jestliže nelze data přenášet do aplikace,
- může být uloženo až 20 neznámých měření,
- váha používá *Bluetooth*<sup>®</sup> Smart (Low Energy) a vysílá ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

### Systémové požadavky

Smartphone/tablet s *Bluetooth*<sup>®</sup> 4.0, např. iPhone 4S, 5.

Seznam kompatibilních zařízení:



## 2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly.



**VAROVÁNÍ**

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



**POZOR**

Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.



**Upozornění**

Upozornění na důležité informace.

## 3. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.



**VAROVÁNÍ**

• **Váhu nesmí používat osoby s lékařskými implantáty (např. kardiostimulátor). Mohlo by dojít k narušení jejich funkce.**

- Váhu nepoužívejte během těhotenství.
- Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy; nebezpečí převrnutí!
- Spolknutí baterií může mít životu nebezpečné následky. Ukládejte baterie a váhu mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Nestoupejte na váhu s mokřýma nohama a pokud je její povrch vlhký – nebezpečí uklouznutí!



**Pokyny pro zacházení s bateriemi**

- Spolknutí baterií může mít životu nebezpečné následky. Baterie a váhu uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
- Slabé baterie včas vyměňte.
- Všechny baterie vždy včas vyměňte a používejte baterie stejného typu.
- Baterie nenabíjejte ani neobnovujte jejich funkci jinými prostředky, nerozebírejte je, nevhazujte do ohně ani nezkratujte.
- Vyteklé baterie mohou váhu poškodit. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
- Pokud baterie vyteče, vezměte si ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchým hadrem.
- Baterie mohou obsahovat jedovaté látky, škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Baterie proto likvidujte v souladu s platnými zákonnými předpisy. Nikdy je nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
- Baterie neházejte do ohně. Nebezpečný výbuch!



**Všeobecné pokyny**

- Váha je určená pouze pro domácí použití, nikoli pro lékařské nebo komerční účely.
- Jelikož se nejedná o cejchovanou váhu pro profesionální lékařské použití, mohou se vyskytovat technicky podmíněné odchylky v měření.
- Maximální zatížitelnost váhy je 180 kg (396 lb, 28 st). Při měření hmotnosti a určování podílu kostní hmoty jsou výsledky indikovány v krocích po 100 g (0,2 lb).
- Výsledky měření podílu tuku, vody a svalové hmoty jsou zobrazovány v krocích po 0,1%.
- Spotřeba kalorií je indikována v krocích po 1 kcal.
- Váha je z výroby nastavena na jednotky „cm“ a „kg“. Během provozu s aplikací můžete měnit nastavení jednotek.
- Váhu postavte na rovný, pevný podklad; pevný podklad je předpokladem pro přesné měření.
- Zařízení chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, velkými teplotními rozdíly a nestavte ho do blízkosti tepelných zdrojů (pečicí trouba, topení).
- Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Beurer nebo autorizovaní prodejci. Před každou reklamací však nejprve zkontrolujte stav baterií a případně je vyměňte.
- Ručíme za to, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici 1999/5/ES (směrnice R&TTE). Kontaktujte prosím servisní středisko na uvedené adrese, pokud si přejete získat podrobné údaje – např. ES prohlášení o shodě.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!